


Corsé PROVIDENCE

ORTOPRONO

CORSÉ DE USO NOCTURNO

para el tratamiento de curvas lumbar, toracolumbar, doble curva y dorsal.

Indicado en escoliosis infantil (a partir de 1 año), juvenil y del adolescente en los tipos de escoliosis Idiopática, Congénita y Neuromuscular.

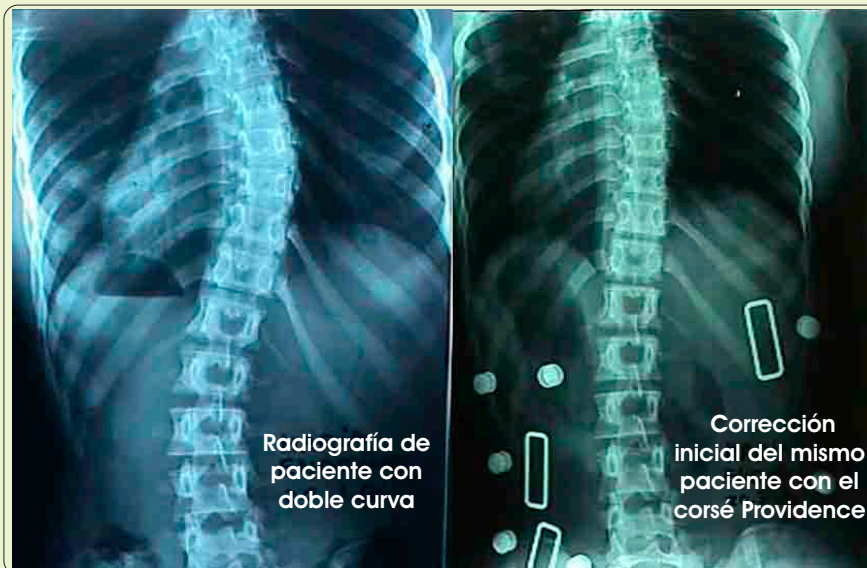

Corsé de Providence para doble curva



Ejerce un control directo sobre las fuerzas laterales y de rotación que deforman la columna.



C A R A C T E R Í S T I C A S

- Corsé de uso nocturno.
- Evita la progresión de la curva.
- Alto grado de cumplimiento y aceptación.
- Gran comodidad para el usuario.
- No interfiere en el crecimiento.
- Diseño y fabricación mediante sistema CAD-CAM con certificado de autenticidad.

B E N E F I C I O S

- No se generan curvas secundarias.
- Se consigue un efecto desrotador en el segmento de columna tratado.
- Se logran hipercorrecciones iniciales y buenos resultados a largo plazo.
- No interfiere en la actividad diaria.
- Precisión en la toma de medidas.
- Alta tolerancia por parte del paciente.

PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN ORTOPÉDICA

Aplicación de fuerzas en tres puntos y desrotación.



FUNCIONAMIENTO

Aplicación de fuerzas controladas, directas, laterales y desrotadoras sobre la columna para alinearla sobre su eje medial. El diseño del corsé se efectúa con el paciente colocado sobre una mesa de medición especial.

cuidados y atenciones

Es preciso el compromiso de los padres para el cumplimiento del tratamiento por parte de los niños.

Se deben seguir las indicaciones del prescriptor y ortopédico sobre la colocación y ajuste correctos del corsé.

otras consideraciones

El Corsé Providence es efectivo en la prevención de la progresión de la escoliosis para curvas menores de 35°.

El uso nocturno permite resolver un ápice de T6, el más alto que puede ser tratado por una ortesis para la escoliosis a tiempo completo.

COLOCACIÓN Y ADAPTACIÓN POR TÉCNICOS ORTOPÉDICOS ACREDITADOS POR **SPINAL TECHNOLOGY INC.**

PROGRAMA DE REVISIÓN ORTOPÉDICA:

- A LAS 2 SEMANAS DE SU COLOCACIÓN.
- POSTERIORMENTE CADA 3 MESES.

Central:

C/ Félix Pizcueta, 10.
46004 - Valencia - España
Tel. 96 353 03 09
Fax. 96 352 51 34

ortoprono@ortoprono.es
www.ortoprono.es